


## GUÍA RÁPIDA “LIGHTWRITER SL35”

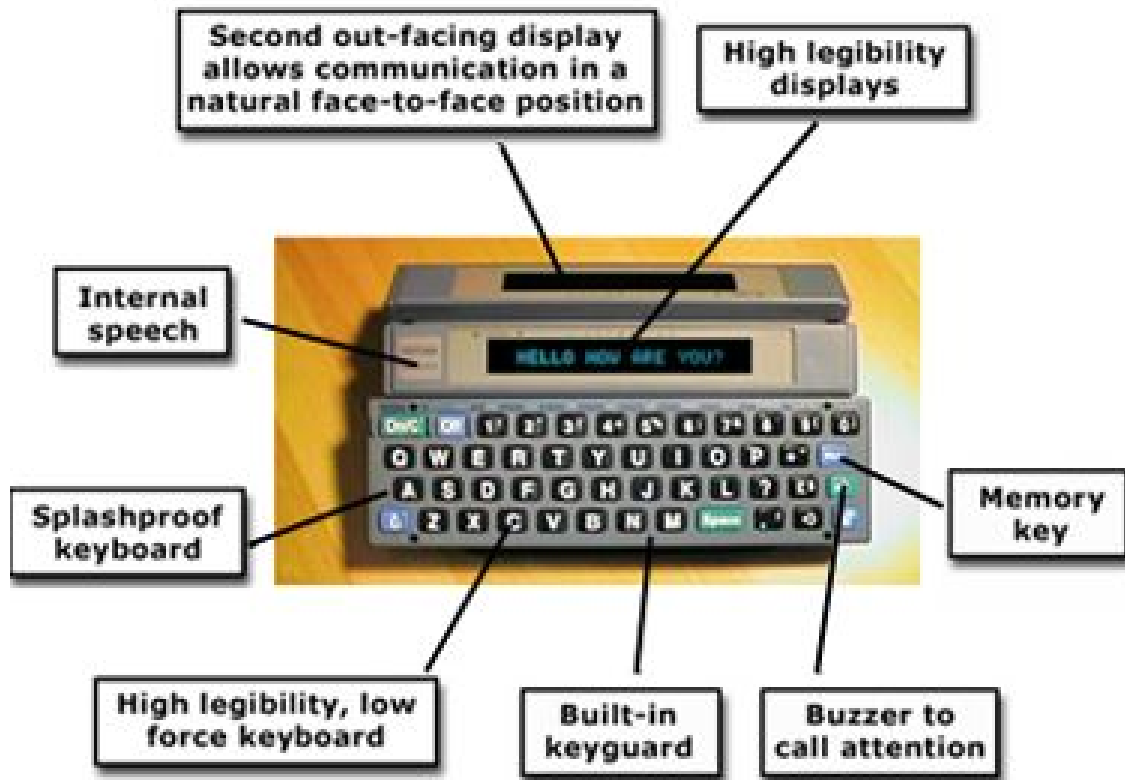

### CUESTIONES BÁSICAS

#### COMENZAR A ESCRIBIR

- Si la batería está cargada, puede empezar a escribir. Si lo desea, también puede utilizar el aparato con el cargador conectado.
- Presione **On/C** y escriba. El aparato “hablará” cada palabra cuando presione **Space** (si está seleccionado el ajuste **Hablar: Cada Palabra**).
- Cuando termine de escribir la frase, presione **Replay** (esquina inferior derecha).

## AJUSTES

- Los ajustes permiten configurar el aparato para que lo puedan utilizar diferentes personas. La mejor manera de aprender es probar diferentes opciones.
- Mire a la pantalla mientras hace los ajustes, así verá lo que está ocurriendo.
- Presione **MEM Replay** (esquina inferior derecha) para entrar a los ajustes del aparato en el nivel “Usuario”, y **Shift** (esquina inferior izquierda) **Punto** para entrar en el nivel “Avanzado”.
- En todos los niveles, utilice las teclas **Punto**, **Espacio** y **Borrar** para navegar por las listas, y + para cambiar de un ajuste a otro; presione **On/C** para salvar los cambios y salir.

## MEMORIAS (MENSAJES GRABADOS)

- Presione **MEM 1**, luego **MEM H**. Hay 14 mensajes “sugeridos”.
- **Para grabar un mensaje asociado a una letra:** Escriba **HOLA** y luego presione **MEM MEM H Y**. Para recuperar el mensaje presione **MEM H**.
- **Para grabar un mensaje asociado a dos letras:** Escriba **GV=GRAN VÍA 50** y luego presione **MEM MEM + Y**. Para recuperar el mensaje escriba **GV** y luego presione **Espacio**.

## SHIFT (MAYÚSCULA)

- Presione **Shift** y luego 2 y 3. Note que sólo la primera letra está en mayúscula.
- Presione **Shift Shift** y luego 2, 3 y 4. Note que todas las letras están en mayúsculas.
- Presione **Shift** de nuevo y luego 2. Note que ahora no está en mayúscula. Mire la parte izquierda de la pantalla.

## RESTABLECER LOS AJUSTES

- Para restablecer todos los ajustes y dejar el aparato “como nuevo”, presione **MEM MEM MEM L 0** luego **Y**, así se reprogramarán todos los ajustes “establecidos de fábrica”

## **CUIDADO DEL APARATO**

- Procure que no se caiga. Es un aparato delicado.
- Colóquelo en un sistema de montaje apropiado, si es necesario.
- Cargue la batería durante la noche si lo utiliza a diario, o cada tres meses si no lo utiliza.

## **LIMPIEZA**

- Utilice un paño húmedo para limpiarlo, procure que no entre agua dentro del aparato.
- No utilice disolventes, especialmente en las pantallas.
- Para limpiar el teclado, desatornille la carcasa, quite las teclas sucias y lávelas, luego vuelva a colocar las teclas y atornille de nuevo la carcasa.