

Comunicador de Blis B335

Manual de usuario

Puesta en marcha

Verificación del contenido del paquete

El paquete del comunicador B335 debe contener:

- 1) Este manual de usuario
- 2) Un certificado de garantía
- 3) Un comunicador modelo B335
- 4) Un cargador de baterías
- 5) Un pedal con cable de metro y medio de longitud
- 6) Una bolsa de transporte

Si su paquete no contiene todos los componentes citados, o alguno de ellos está defectuoso póngase inmediatamente en contacto con su distribuidor.

Como recargar las baterías

Para realizar esta operación será necesario disponer de una toma de corriente de 220V

- 1) Conectar el cargador en la toma de corriente de la línea eléctrica (220V 50Hz).
- 2) Conectar el conector situado en el extremo del cable del cargador en uno de los dos conectores situados en la parte trasera del comunicador y marcados como “**9VDC SWICH**”. Es indiferente en cual de los dos conectores se conecte, ambos son iguales.
- 3) Verificar que el indicador luminoso marcado como “**CHARGE**” se encienda.
- 4) Dejar el comunicador conectado durante al menos 6 horas. Durante este tiempo el comunicador podrá ser utilizado de forma totalmente normal.
- 5) Transcurrido este tiempo desconectar el comunicador del cargador.
- 6) Desconectar el cargador de la línea eléctrica.

Si al realizar el paso número dos, el indicador “**CHARGE**” no se enciende póngase inmediatamente en contacto con su distribuidor.

Puesta en marcha

Como conectar el pedal de maniobra

- 1) Desenrollar el cable del pedal.
- 2) Conectar el conector situado en el extremo del cable del pedal en uno de los dos conectores situados en la parte trasera del comunicador y marcarlos como “**9VDC SWICH**”. Es indiferente en cual de los dos conectores se conecte, ambos son iguales.

Es posible que el comunicador se encienda al conectar el pedal, si esto sucede esperar a que se apague.

Como seleccionar la velocidad adecuada

Este paso lo debe realizar el usuario final del comunicador. No obstante es aconsejable que este sea ayudado por un tutor o monitor.

- 1) Con el comunicador apagado, situar el selector de velocidad situado en la parte posterior del comunicador y marcado como “**SPEED**” en la velocidad lenta indicada con un “**3**”.
- 2) Pulsar una vez el pedal, el indicador luminoso se desplazara horizontalmente a lo largo de las 7 columnas del comunicador.
- 3) Pulsar otra vez el pedal cuando el indicador luminoso este sobre la columna nº4, es decir la central.
- 4) El indicador luminoso se desplazara verticalmente por la coluna indicada en el momento de su ultima pulsacion, de manera que si el paso anterior ha sido realizado correctamente, el indicador se desplazara por la columna central. Tanto si es asi como si no, el indicador luminoso se desplazara verticalmente a lo largo de las 5 filas del comunicador.
- 5) Pulsar de nuevo el pedal cuando el indicador luminoso este sobre la fila nº3, es decir sobre la fila central.

Puesta en marcha

Como seleccionar la velocidad adecuada

- 6) El indicador luminoso se detendrá en la casilla indicada en el momento de su última pulsación, de manera que si el paso anterior ha sido realizado correctamente, el indicador permanecerá parpadeando en la casilla central hasta que se realice una nueva pulsación, o se apague el comunicador.
- 7) Si los pasos 3 y 5 se han realizado con éxito repetir el proceso a partir del paso nº2 con una velocidad más rápida. Las tres velocidades son las siguientes:
 - **Rápida** marcada como "1"
 - **Media** marcada como "2"
 - **Lenta** Marcada como "3"

A lo largo de este proceso se han realizado todas las operaciones mediante el pedal, pero se podrían realizar de la misma manera con el pulsador de maniobra marcado como "PUSH".

Usando el comunicador

Como funciona

El comunicador B335 dispone de tres modos de funcionamiento:

- 1) Escaneo de columnas, en este modo el comunicador desplaza el indicador luminoso horizontalmente por las 7 columnas de que dispone, dandonos la posibilidad de escoger una de de ellas.
- 2) Escaneo de filas, modo en el que el comunicador desplaza el indicador luminoso verticalmente, dandonos a escoger una de las 5 casillas de la columna escogida en el modo 1.
- 3) Marcado de casilla, el comunicador mantendra parpadeando el indicador luminoso en la casilla escogida en el modo 2.

El comunicador pasara automáticamente de un modo al siguiente en cada pulsación, es decir. Si esta en modo 1 y se realiza una pulsación pasara a estar en modo 2, y si se efectúa una nueva pulsación pasara al modo 3, y tras otra pulsación retornara al modo 1.

Si alguna de las 35 casillas no se iluminara al detener el indicador luminoso sobre ella póngase inmediatamente en contacto con su distribuidor.

Activación de la alerta sonora

Para activar la alarma sonora basta con detener el indicador luminoso en la casilla de Ayuda, situada en la fila nº5 y en la columna nº7, es decir la casilla de la esquina inferior derecha. En esta casilla el indicador se alternara con un pitido intermitente producido por el zumbador marcado en la parte posterior del equipo como “BEEPER”.

Si al situar el indicador luminoso sobre la casilla de Ayuda no se escuchara ningun pitido póngase inmediatamente en contacto con su distribuidor.

Usando el comunicador

Como apagar el comunicador

El comunicador modelo B335 se apaga de forma automática 2 minutos después de la última pulsación. De manera que para apagar el comunicador basta esperar dos minutos de inactividad.

Si tras dos minutos de inactividad el comunicador no se apaga póngase inmediatamente en contacto con su distribuidor.

Indice

Capitulo 1: Puesta en marcha	
Verificacion del contenido del paquete	1
Como recargar las baterias	1
Como conectar el pedal de maniobra	2
Como seleccionar la velocidad adecuada	2-3
Capitulo 2: Usando el comunicador	
Como funciona	4
Actibacion de la alerta sonora	4
Como apagar el comunicador	5
Indice	6